

Permet d'afficher l'historique de l'activité passée dans la chambre.

Heure de l'activité la plus récente.

Actif:
Le résident est actif dans la chambre.

Liste des alarmes précédentes. Appuyez sur l'icône rouge pour indiquer si de l'aide a été fournie. L'icône devient grise. Appuyer sur les alarmes grises permet de revoir l'événement. Toutes les alarmes disparaissent automatiquement après 24h.

Online:
Actuellement aucune activité dans la chambre


Activation automatique:
Le sol connecté s'active automatiquement après un certain temps.

Tapez ici pour accéder à la vue en direct (live).

Tapez ici pour éteindre et allumer manuellement (par ex. pour le nettoyage des sols). Arrêt permanent via le menu d'options.


Sol éteint:
Le sol a été désactivé par un interrupteur à clé ou un fusible. Impossible de mettre en route depuis le terminal de la station.

Nombre et statut de la personne dans la chambre (debout, se déplace, tombé au sol).

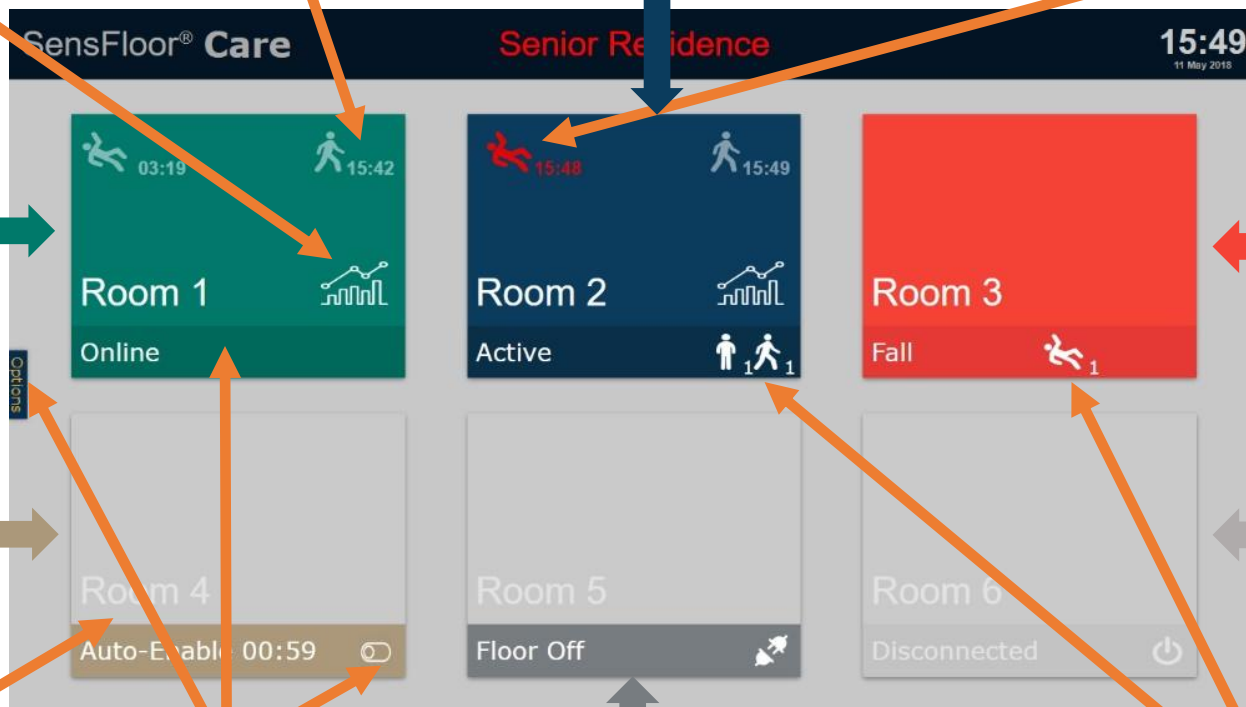

Chute:
La personne est au sol. Une aide immédiate est requise !

Déconnecté:
Erreur (problème informatique)
Contactez le service !

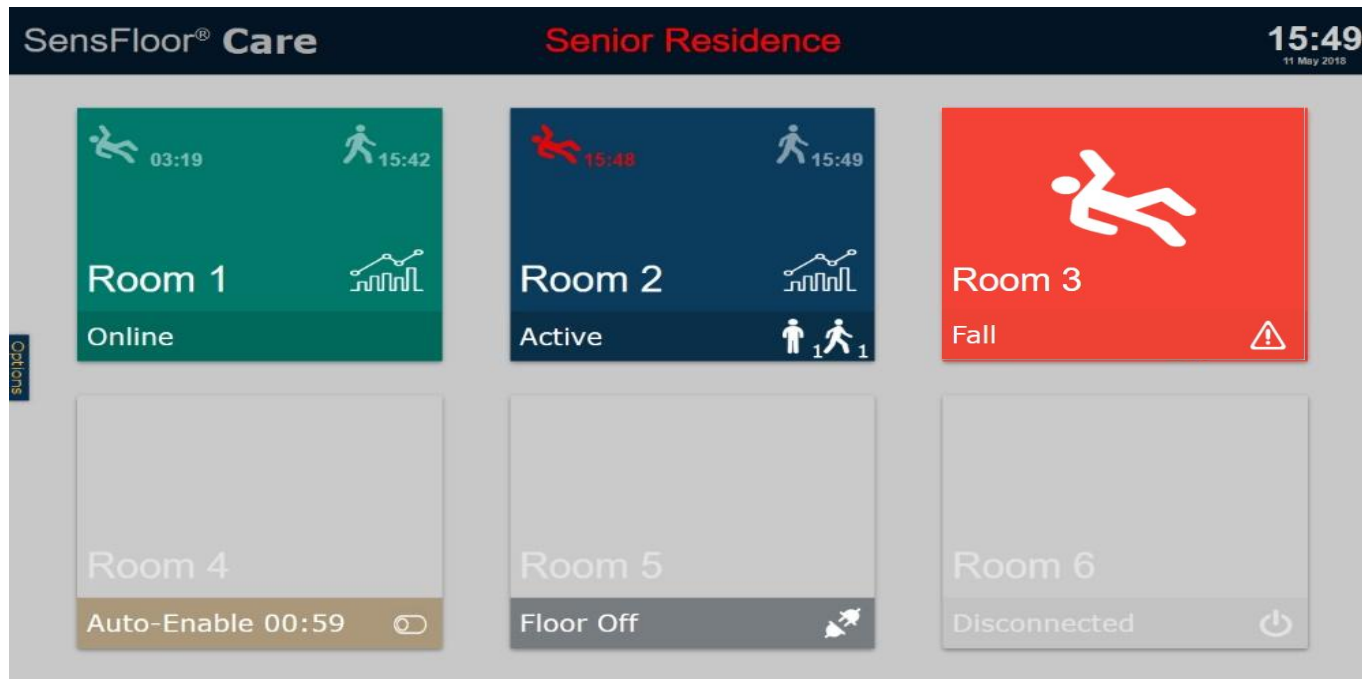

Symboles

Heure de la dernière activité



Alarme en cours. Taper pour acquitter.



Appuyer pour voir la liste des alarmes. Les alarmes grises ont été acquittées. Revisualiser l'événement ici.



Appuyer ici pour accéder à l'affichage de l'historique.



Appuyer ici pour accéder à l'affichage en direct.



Couleurs

Pas d'activité dans la chambre.



Activité dans la chambre



Chute ! Aide immédiate requise !



La personne quitte la chambre.



La personne quitte son lit.



Pas de fonction SensFloor disponible pour le moment



Barre d'affichage

Une personne se déplace dans la chambre.



Capteur externe actif (p.ex. WC occupé).




SensFloor® est désactivé! Réactivation dans le menu options!



Une personne est debout.



Taper sur l'icône désactive momentanément le SensFloor. Réactivation en tapant ou après écoulement du temps

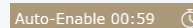


Le SensFloor a été désactivé par l'interrupteur à clé/fuse. Activation impossible sur le terminal de station.



Une personne se déplace, une autre est debout.




Recalibration du SensFloor®

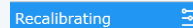

Pas de connexion au terminal de la chambre. Appeler le service !



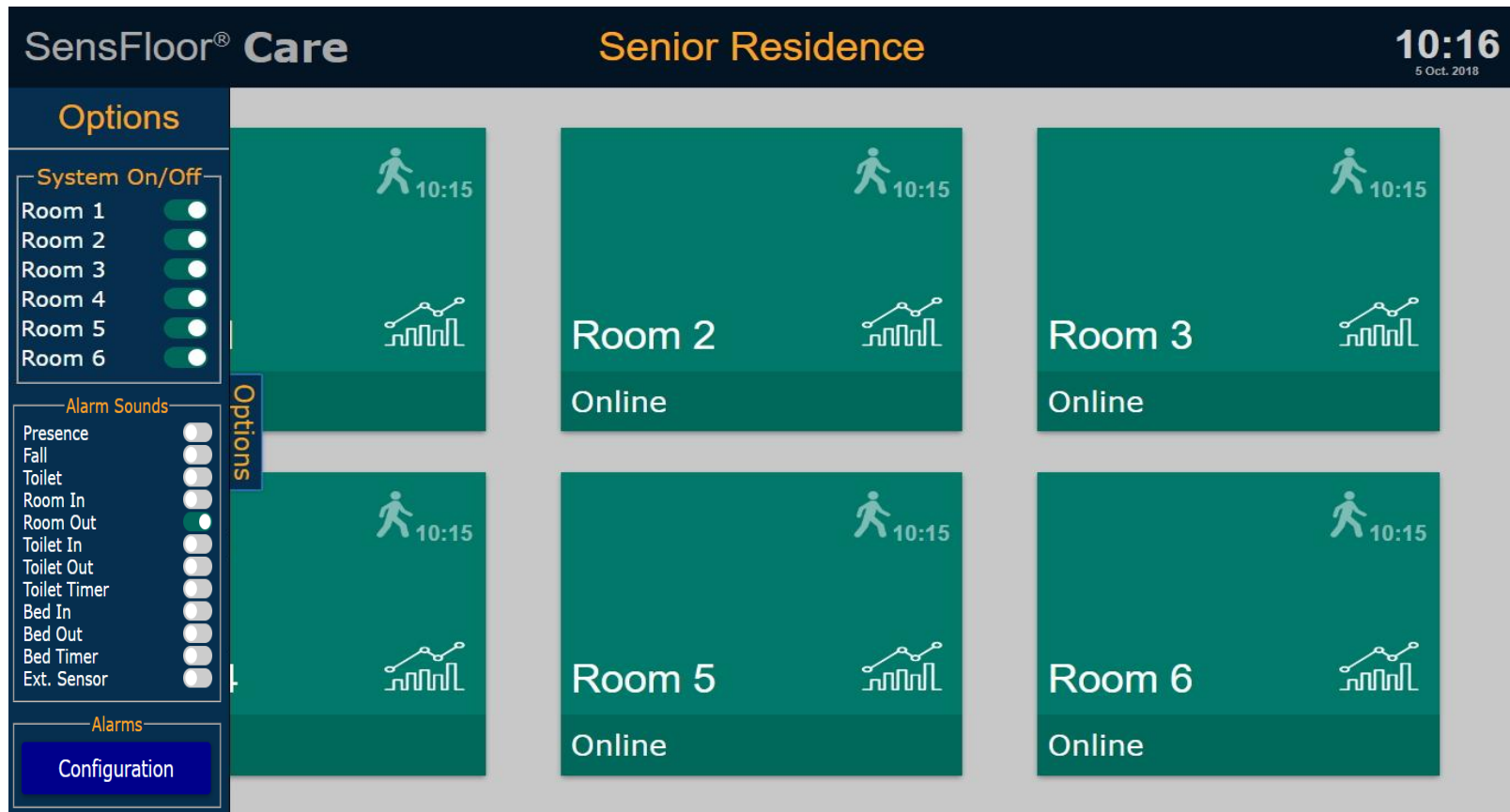

- Le menu d'options peut être déroulé et refermé en tapant sur « Options ». La langue peut être changée.
- Le système SensFloor de n'importe quelle chambre peut être désactivé depuis le menu « Options ». Contrairement à la barre de multifonctions de chaque chambre, aucune fonction d'activation automatique ne permet d'activer le système automatiquement. L'utilisateur est donc responsable de la réactivation du système !
- Des sons individuels peuvent être activés pour certaines alarmes. Pour cela, il faut disposer d'un moniteur avec haut-parleur. Cette fonction ne remplace pas un système d'appel patient !
- Sous « Alarmes - Configuration », il est possible de désactiver des alarmes individuelles pour chaque chambre ou de les activer pour un créneau horaire donné (p. ex. une alarme « quitter le lit » uniquement la nuit).

The screenshot shows the 'Alarms Configuration' screen for 'Senior Residence'. On the left, a list of rooms (Room 1 to Room 5) is displayed, each with '4/4 alarms enabled' and icons for different alarm types. Room 3 is selected. On the right, the configuration for Room 3 is shown, including a list of alarms (e.g., '4: Bed Out'), a toggle for 'Alarm Enabled', a checkbox for 'Alarm is active during:', and a time range selector (From: 00:00 To: 23:45). A 'Update Room Alarms' button is at the bottom. A clock in the top right shows 10:08 on 5 Oct. 2018. A vertical time list on the right side of the screen shows times from 20:15 to 23:45.


Callouts (Left):

- Taper pour sélectionner une chambre
- Nombre d'alarmes activées
- Icônes de toutes les alarmes configurées. Les alarmes désactivées sont grisées.
- Retour à l'aperçu de la pièce

Callouts (Right):

- Sélectionner l'une des alarmes prédéfinies
- Activer ou désactiver l'alarme
- Activer ou désactiver le créneau horaire
- Sélectionner le créneau horaire
- Appliquer les changements pour cette chambre

- L'utilisateur peut activer ou désactiver individuellement pour chaque chambre une ou plusieurs des alarmes préconfigurées sur le terminal de chambre. Pour un grand nombre de chambres, il est possible de faire défiler la liste des chambres.
- Pour chaque alarme, il est possible de sélectionner un créneau horaire (par exemple, la nuit).
- Dans la liste des chambres, des icônes indiquent le statut des alarmes sélectionnées pour chaque chambre (blanc=activé, gris=désactivé, symbole de l'horloge=créneau horaire défini).
- Les modifications de configuration d'une chambre doivent être sauvegardées avec l'icône « Actualiser les alarmes de chambre » avant de sélectionner la chambre suivante.

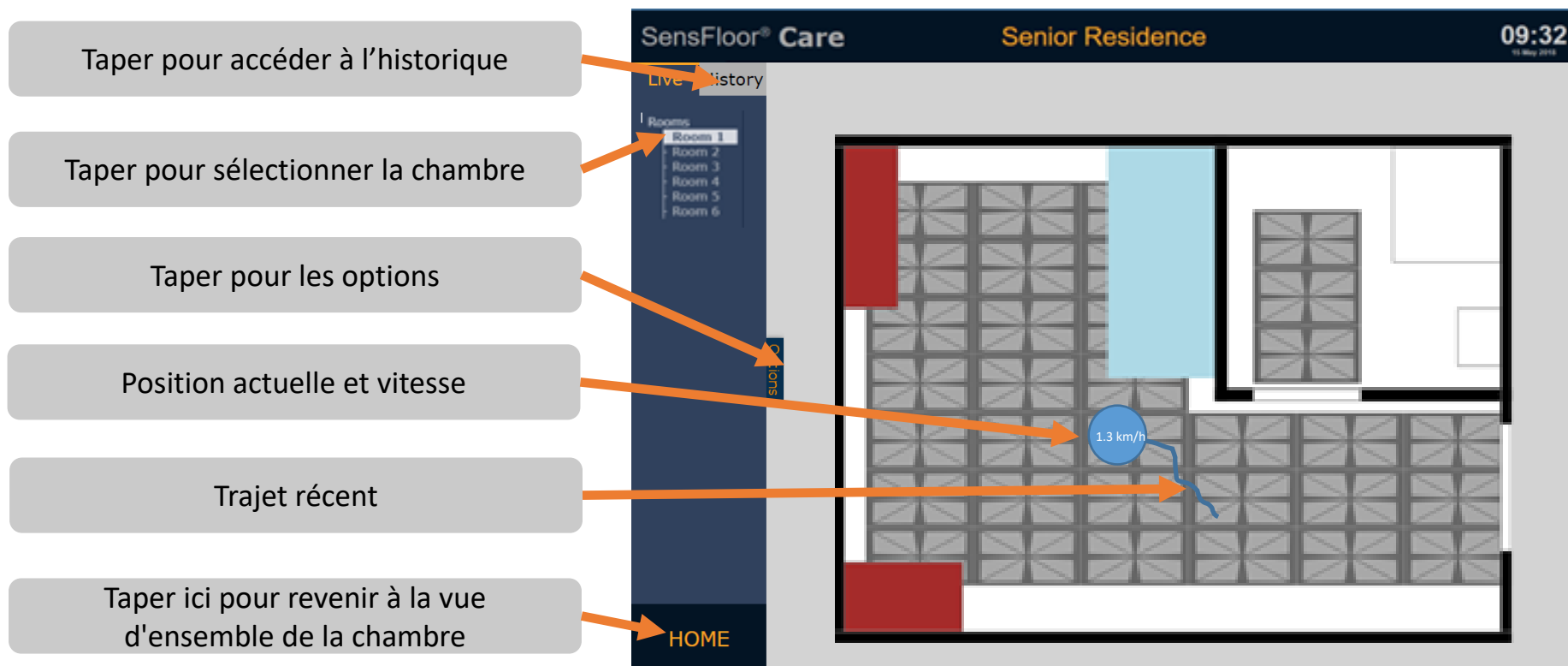

- On accède à l'affichage en direct en tapant sur le nom de la chambre dans l'aperçu de la chambre.
- Les personnes présentes dans la chambre sont représentées par des cercles en mouvement, avec leur vitesse actuelle et leur trajectoire récente.
- Les chutes sont signalées par un fond rouge et une indication de l'endroit où elles se sont produites.
- Il est possible d'accéder à la vue sur l'historique soit en tapant sur l'onglet « Historique », soit en tapant sur le symbole  dans la vue d'ensemble de la chambre.

Montrer ou masquer les détails d’affichage

L’option "Compter" permet d’afficher des statistiques sur les zones visitées dans la chambre.


L’option "Jeu" active un jeu de course simple sur le SensFloor.

Ces options permettent d’afficher les détails d’une chute.

Active les sons pour certaines activités (moniteur avec haut-parleur requis).

Fonctions spéciales pour les installations de démonstration.

Vitesse du graphique. La meilleure valeur dépend de la complexité et de la taille de l’installation du SensFloor.

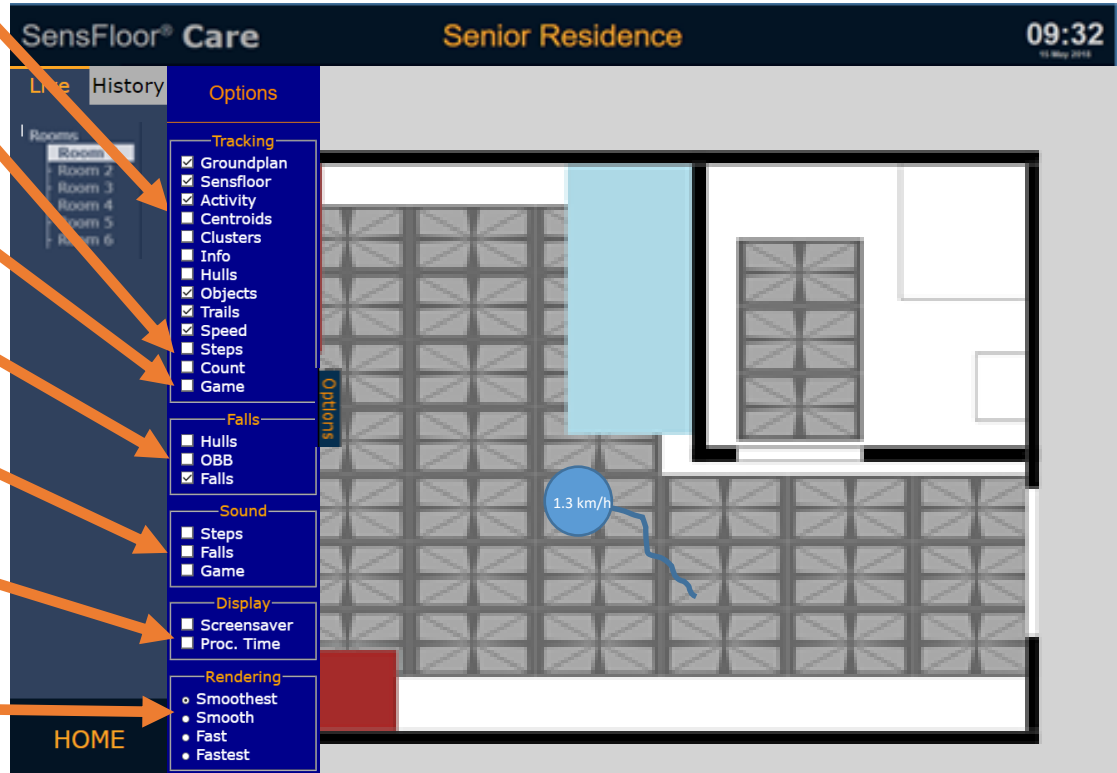

- En tapant « Options », un menu de configuration peut être affiché. **Ces options sont réservées aux utilisateurs expérimentés et ne doivent pas être modifiées pour les applications normales de SensFloor Care !**
- Les détails de l’affichage en direct peuvent être vus et modifiés en cochant les options correspondantes.
- Certaines vues spéciales peuvent être activées à des fins de démonstration, (« Compter », « Jeu », « Diaporama »).
- L’utilisateur peut contrôler si et de quelle façon les chutes sont représentées dans l’affichage en direct (indépendamment de la vue d’ensemble de la chambre).

Sélection de plages horaires pour l'analyse
(par défaut : jour et heure actuels)

Taper ici pour sélectionner le
mode chronologique ou le
mode calendrier.

Activité : sélectionner le pourcentage de temps
actif ou le nombre de personnes. Alarmes : afficher
toutes les alarmes ou en sélectionner le type.

On accède ici à l'affichage en direct.


Taper ici pour sélectionner la chambre.

Sélection de l'aperçu (standard), de
l'analyse (historique), du playback et du
rapport de l'activité de la chambre

Résumé de toutes les périodes

Données d'un créneau horaire
(par défaut : uniquement le jour actuel)

Retour à l'aperçu des chambres

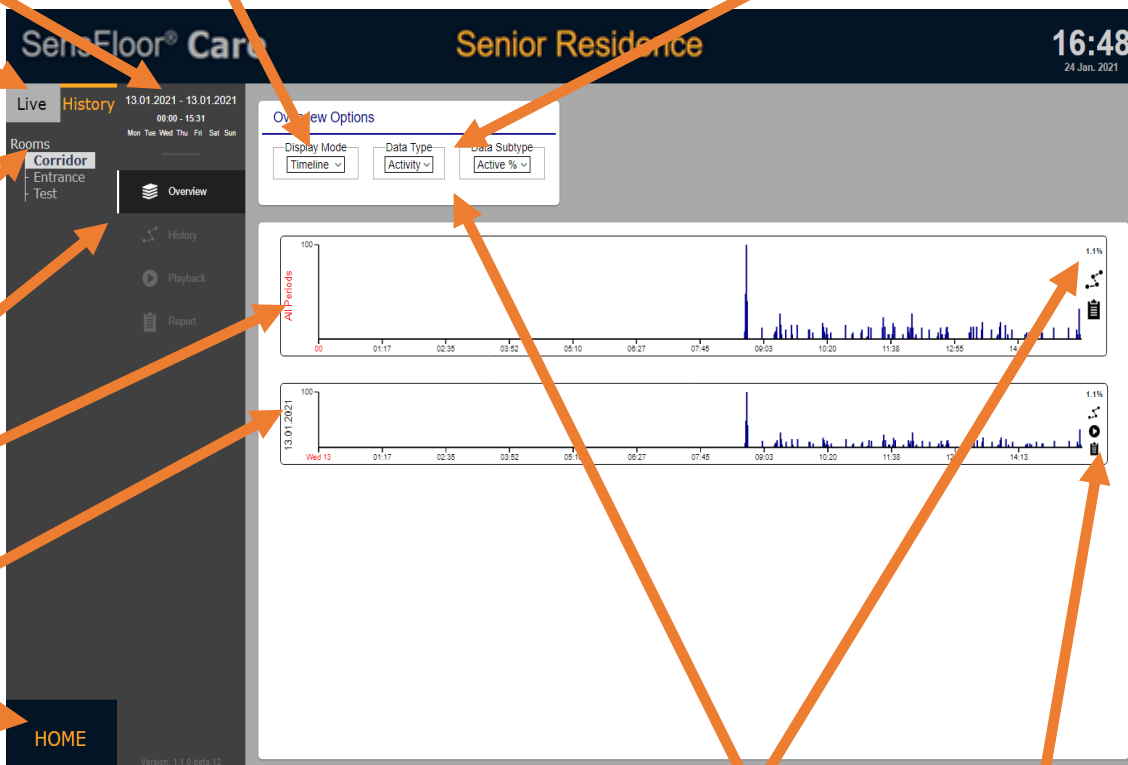

- Taper sur "Historique" depuis l'aperçu de la chambre ou l'affichage en direct pour charger les données du jour actuel du terminal de chambre et affiche le % du temps actif dans la chambre.
- Des jours et créneaux horaires peuvent être sélectionnés pour analyse.
- Les données sont affichées pour les mêmes fenêtres de temps mais pour des jours différents.
- Type et sous-type des données affichées peuvent être configurés.

% moyen d'activité
ou somme des
personnes/alarmes
(en fonction du
type de données et
du sous-type
sélectionné dans
"Options
d'affichage")

Raccourcis
vers
l'historique,
le playback
et le
rapport
d'activité
pour cette
période. 7

Il est possible de sélectionner ici des créneaux horaires et des jours.

Sélectionner "Plage de dates" pour afficher le calendrier. Choisissez d'abord le jour de début et de fin à analyser et appuyer sur "Confirmer".

Date Range

24.01.2021 - 24.01.2021

Ces raccourcis permettent de sélectionner des périodes prédéfinies.

Sélectionner ici l'heure de début et de fin à l'aide des flèches ou des chiffres. Le créneau horaire s'applique à tous les jours sélectionnés.

Taper ici pour inclure ou exclure les jours de la semaine de l'ensemble des jours sélectionnés.

Cette option permet de récupérer uniquement les données relatives aux événements (par ex. les alarmes).

Appuyer sur cette touche pour télécharger les données de localisation de la chambre vers le terminal de station. La durée du téléchargement dépend de la durée de la période.




Le type de données « Alarmes » et le sous-type « Chute » sont sélectionnés.

Ce panneau affiche toutes les alarmes de ce type dans toutes les périodes pour l'ensemble des jours

Ces panneaux affichent toutes les alarmes de ce type pour un jour donné (possible de faire défiler).

Chaque alarme est indiquée par une ligne verticale au moment de l'alerte. Si le sous-type de données "Tous" est sélectionné, les alarmes sont indiquées en gris, sinon elles affichent la couleur de l'alarme.

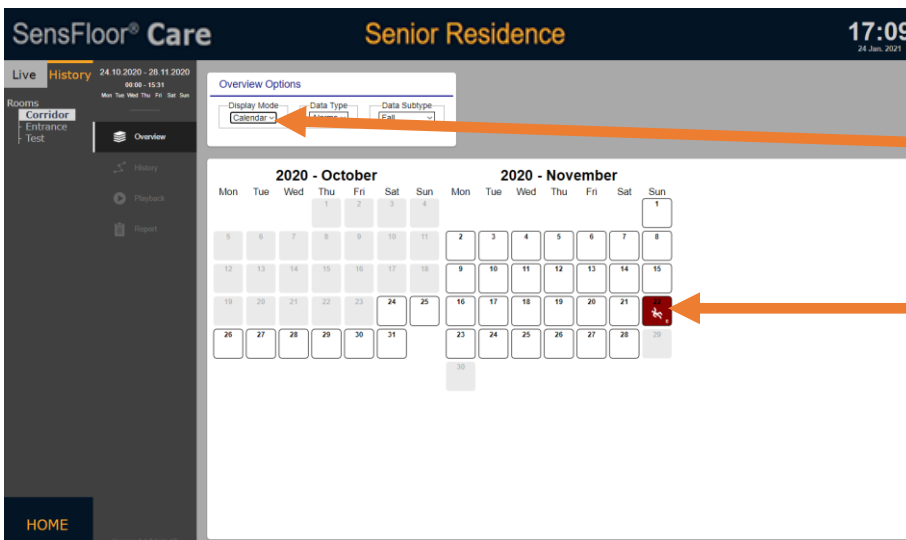

L'affichage du calendrier est sélectionné.

Les jours avec des alarmes sont affichés dans leur couleur. Le blanc signifie qu'il n'y a pas eu d'alarme de ce type ce jour-là.

Cliquez ici pour voir l'historique sur le plan de la chambre.

Localisation des alarmes

Trajectoires

Sélectionnez ici une période à analyser.

Ici, vous pouvez afficher le plan de chambre, le SensFloor, les trajectoires et/ou les lieux des alarmes.


Sélectionnez le type de données à afficher dans la ligne de temps.

Selon le type de données sélectionné, l'activité ou le nombre de personnes est indiqué dans la ligne du temps.


Les alarmes sont affichées sous forme de points colorés au-dessus des barres.



- L'onglet "Historique" affiche des détails sur le mouvement des personnes et les emplacements des alarmes dans la chambre.
- Les lieux des événements sont indiqués par des icônes et des couleurs correspondantes.
- Par défaut, toutes les données de la période sélectionnée sont affichées simultanément. Pour simplifier, certains éléments peuvent être exclus de l'affichage.
- La fenêtre temporelle des données à afficher peut être réduite (voir page suivante).

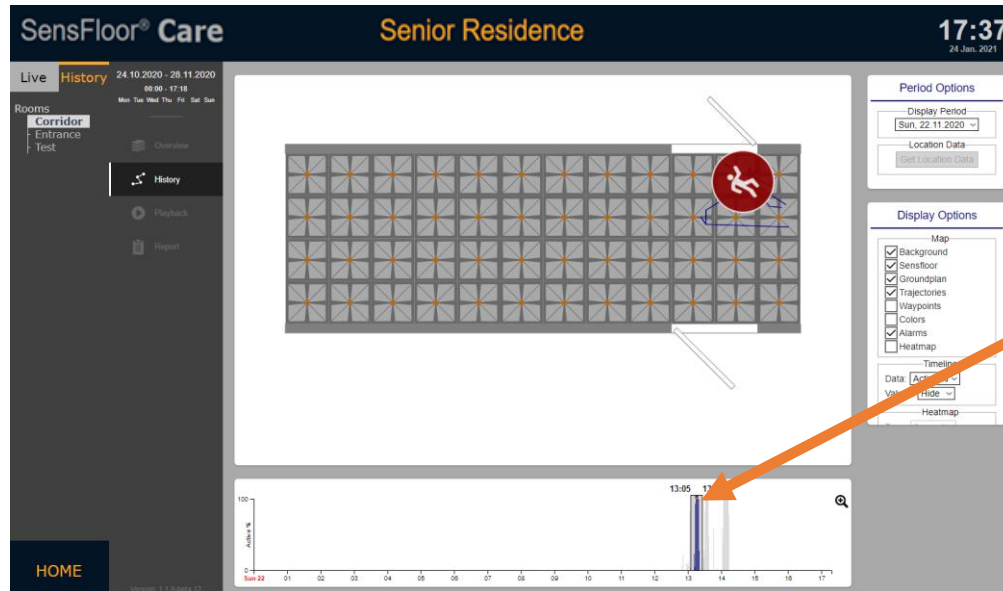


Taper et glisser ici pour sélectionner une fenêtre de temps plus courte autour des événements intéressants. Seules les données sur la localisation et les événements survenus au cours de cette période sont affichées sur le plan de la chambre. Le reste de la ligne de temps est grisé. La sélection surlignée peut être redimensionnée et déplacée sur la ligne de temps. L'heure de début et de fin de la fenêtre est indiquée. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour analyser les mouvements avant une chute.

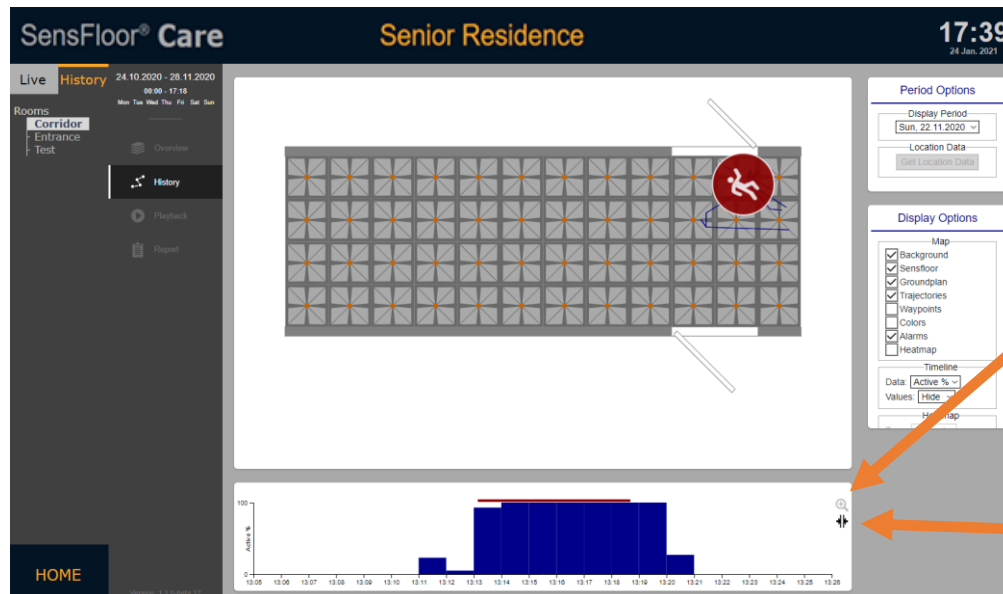

L'icône de la loupe permet de zoomer sur la plage horaire sélectionnée, dont les limites peuvent être modifiées en tapant à nouveau tapotement et en glissant jusqu'à l'échelle de précision des minutes. Il est ainsi possible d'effectuer une analyse détaillée autour d'un événement.

Taper ici pour revenir à la série chronologique complète.

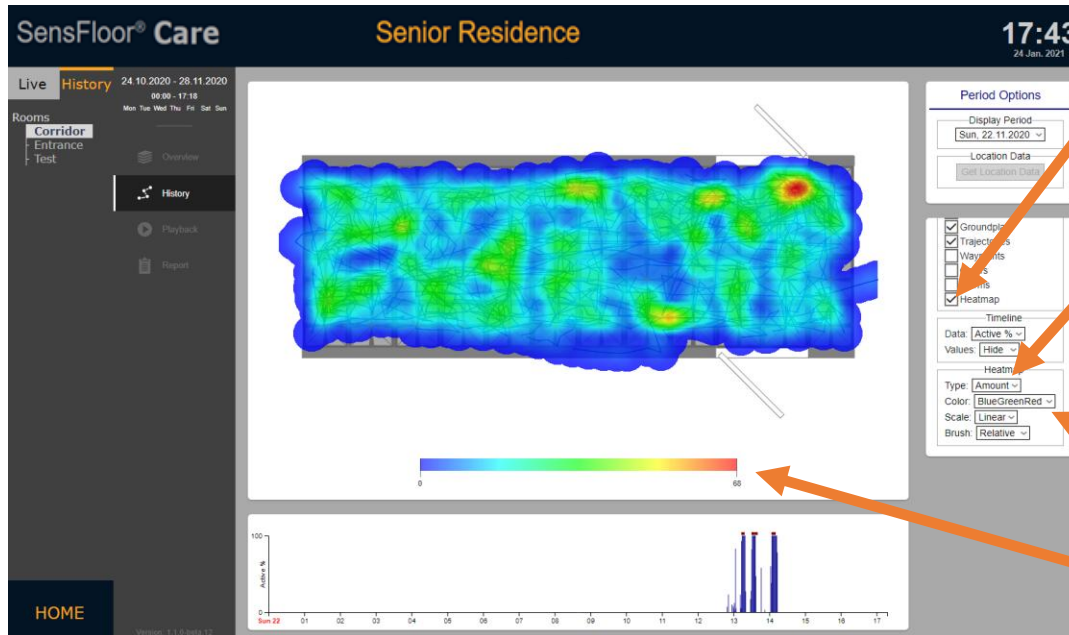

Sélectionner « Heatmap » pour afficher les lieux les plus fréquemment visités.

Soit la « quantité » d'activité, soit la durée pendant laquelle la personne est restée au même endroit sont affichées.

Choisissez une échelle de couleurs linéaire ou logarithmique.

La légende indique les valeurs d'échelle des couleurs.



Si une fenêtre de temps est sélectionnée, la carte thermique est affichée pour les lieux visités dans cet intervalle uniquement. La fenêtre peut être déplacée sur la ligne de temps.


Sélectionnez le pinceau "Absolu" pour normaliser la carte thermique sur la fenêtre de temps sélectionnée.

Taper ici pour lire les données enregistrées.

Parcours récent

Personne en mouvement

Sélectionner "Objets" pour voir la personne en mouvement et "Trace" pour voir le parcours.

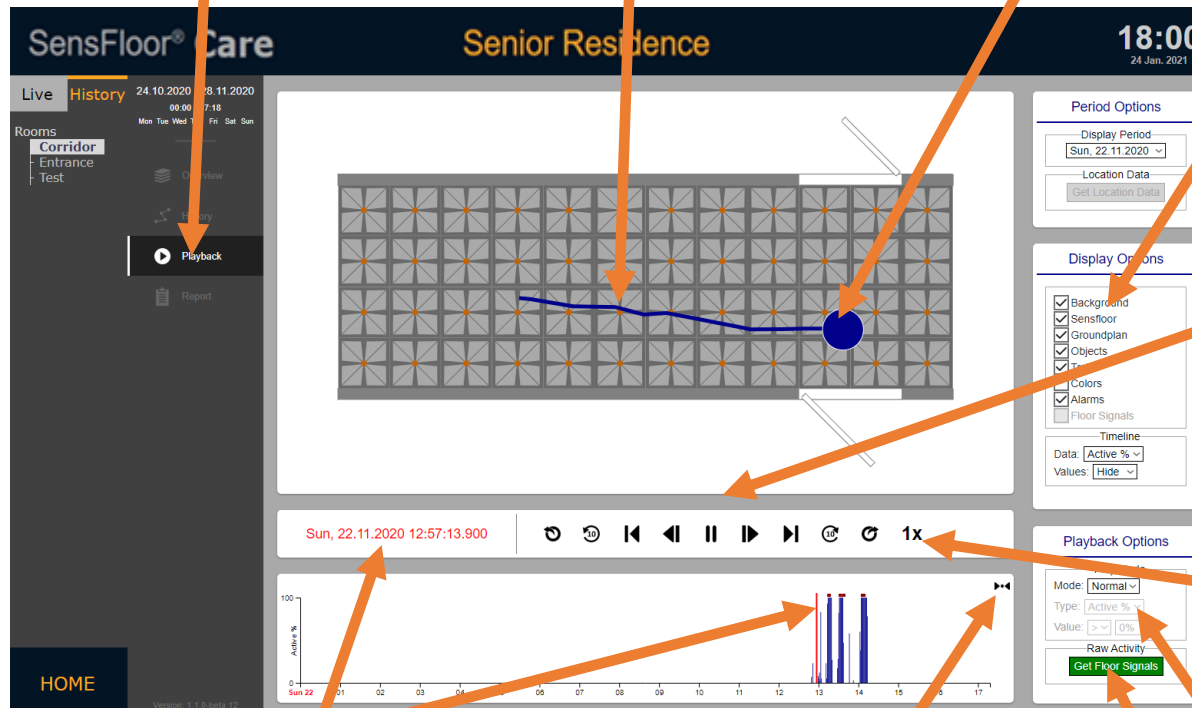

Boutons de lecture:

- reculer/avancer 10s
- aller début/fin de la fenêtre
- reculer/avancer 100ms
- lecture/pause
- sauter au prochain évènement

Touchez pour un ralenti ou un laps de temps

Options de lecture :

Sauter : sauter les intervalles vides
Filtre : filtrer la ligne de temps par objets ou alarmes avec des paramètres

Obtenir les données brutes du capteur et afficher l'activité du capteur avec "Signaux au sol".

Horodatage de la position actuelle sur la ligne de temps, également indiqué par la ligne verticale rouge (curseur temporel) dans la fenêtre temporelle. L'horodatage est rouge lorsque la lecture est en cours.

Basculez entre le mode de sélection de la fenêtre temporelle (icône noire) et le mode de curseur temporel mobile (icône rouge).

SensFloor® Care Senior Residence 20:06 24 Jan. 2021

Live History 18.11.2020 - 28.11.2020 00:00 - 17:18

Rooms: Corridor Entrance Test

Overview History Playback

Report

SensFloor Activity Report - c0a00146

Alarms: Fall

From 18.11.2020 to 28.11.2020 Between 00:00 and 17:18 Week Days Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Total Events: 6

Number	Type	Start Time	End Time	X	Y
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 13:13:08	Sun, 22.11.2020 - 13:18:41	0.668	0.332
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 13:30:18	Sun, 22.11.2020 - 13:35:35	0.682	0.620
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 13:35:41	Sun, 22.11.2020 - 13:35:41	3.821	0.367
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 13:35:46	Sun, 22.11.2020 - 13:35:54	4.846	0.690
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 14:03:43	Sun, 22.11.2020 - 14:04:59	2.706	0.133
0	Fall	Sun, 22.11.2020 - 14:06:00	Sun, 22.11.2020 - 14:10:48	1.454	0.251

Report Options

Reporting Period: All Periods

Data Type: Alarms

Data Subtype: Fall

Export: Download as PDF Download as CSV

Sélectionner le thème du rapport « Activité » ou « Alarmes ».

Sélectionnez le type d'alarme ou « Tout »

Un fichier texte de la vue actuelle est généré ici.

Taper ici pour obtenir un document pdf prêt à l'impression.

Taper ici pour aller à la fonction de rapport.

Les données listées peuvent être exportées pour simplifier la documentation (par ex. des chutes).

Les coordonnées métriques sont relatives au point zéro choisi lors de l'installation du SensFloor.